

Kompatibel mit
viralen Transportmedien
(VTM) ohne
denaturierende
Wirkstoffe

NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B Test

Zum qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2- sowie viralen Influenzavirus-Typ-A- und Typ-B-Nukleoprotein-Antigenen in humanen, nasopharyngealen Proben

COVID-19 oder Influenza?

Die Atemwegsinfektion COVID-19 – ausgelöst durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 – kann oftmals ähnliche Symptome hervorrufen wie eine klassische Influenza. Aufgrund der Meldepflicht bei einer COVID-Erkrankung ist es essentiell bei einem Patienten mit starken Krankheitssymptomen wie beispielsweise Fieber, trockenem Husten, Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Abgeschlagenheit möglichst schnell eine spezifische Diagnose zu stellen.

Der NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B Kombi-Test soll Sie dabei unterstützen, schnell und unkompliziert abzugrenzen, ob eine COVID-Infektion oder aber eine Influenza vorliegen könnte.

Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht eine rasche Einleitung von Maßnahmen zum Schutz von Patienten und Kontaktpersonen sowie die Einhaltung der Meldepflicht einer COVID-Erkrankung.

NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B Test

Der NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B Test ist ein chromatographischer Immunoassay im Lateral-Flow Format zum qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2- sowie Influenzavirus Typ A- und Typ B-Nukleoprotein-Antigenen in humanen nasopharyngealen Proben. Der NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B Test enthält zwei interne Teststreifen.


Der Test ist als Hilfsmittel bei der Diagnose einer Infektion mit SARS-CoV-2 sowie Influenzavirus Typ A und Typ B bestimmt. Zu beachten ist, dass die Konzentration der viralen Nukleoprotein-Antigene im Verlauf der Erkrankung schwanken und unter die Nachweisgrenze des Tests fallen kann. Eine mögliche Infektiosität der Testpersonen kann aufgrund negativer Testergebnisse nicht ausgeschlossen werden

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✓ 2-in-1 Testkassette zur Ermittlung beider Parameter zeitgleich
- ✓ Verwendung der gleichen Probe für beide Parameter möglich
- ✓ Ergebnisse innerhalb von nur 15 Minuten
- ✓ Extraktionspuffer inaktiviert das Coronavirus und bietet damit Sicherheit bei der Testdurchführung.
- ✓ Alle Testkomponenten im Kit enthalten
- ✓ Lagerung bei Raumtemperatur



Testdurchführung

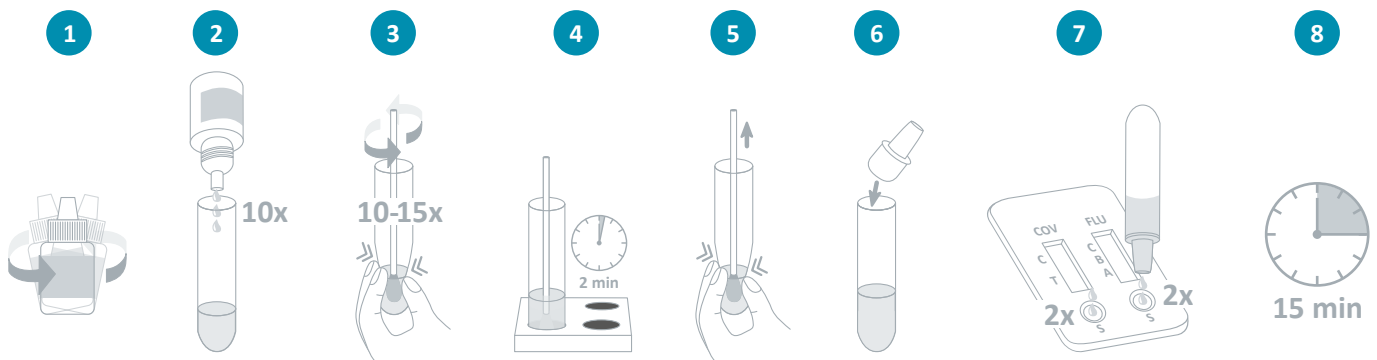

- Mischen Sie vorsichtig den Puffer, indem Sie das Pufferfläschchen schütteln.
- Halten Sie das Pufferfläschchen senkrecht und geben Sie 10 Tropfen in das Extraktionsröhrchen, ohne dabei den Rand des Röhrchens zu berühren.
- Geben Sie den Abstrichtupfer mit der entnommenen Probe in das Röhrchen. Drehen Sie den Tupfer und drücken Sie ihn 10-15 Mal, indem Sie die Wand des Extraktionsröhrchens gegen den Tupfer zusammendrücken, um die im Tupfer enthaltenen Antigene zu extrahieren.
- Lassen Sie die Lösung für 2 Minuten stehen.
- Entnehmen Sie den Abstrichtupfer und drücken Sie ihn dabei fest gegen die Röhrchenwand, um so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem Abstrichtupfer auszudrücken.
- Setzen Sie einen Tropfaufsatz auf das Extraktionsröhrchen auf, drehen Sie das Röhrchen um.
- Geben Sie jeweils 2 Tropfen der extrahierten Lösung in jede Probenvertiefung (S) der Testkassette.
- Warten Sie darauf, dass die farbige(n) Linie(n) erscheint/en. Werten Sie das Testergebnis nach genau 15 Minuten aus.

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Testauswertung



NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B Test

Zum qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2- sowie viralen Influenzavirus Typ A- und Typ B-Nukleoprotein-Antigenen

Produkt	Probenmaterial	Sensitivität	Spezifität	Bestell-Nr.	Packungsgröße
NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B Testkassette	Nasopharyngeale Abstriche	Influenza A: 83,3 % Influenza B: 82,4 % COVID-19 Ag: (Ct 20-30): 97,6 %	Influenza A: 92 % Influenza B: 94,3 % COVID-19 Ag: >99,9 %	243203N-20	20 Tests pro Packung

Im Lieferumfang enthalten sind Testkassetten • Abstrichtupfer • Extraktionsröhrchen inkl. Tropfaufsätze • Puffer • Reagenzienhalter • Gebrauchsanweisung

Gerne beantwortet unser **Vertriebsteam** alle Ihre Fragen unter
Tel.: +49 941 29010-0 oder +49 2841 99 820-0 und per E-Mail vertrieb@nal-vonminden.de

We help you care!

- Schnelltests
- Labordiagnostik
- Laborservice
- Beratung & Service